

Кровоспинна пов'язка CELOX Rapid



Кровоспинна пов'язка найшвидшої дії -
зупиняє сильну артеріальну кровотечу лише
за 60 секунд.

Розмір

Довжина 152,4 см;

Ширина 7,62 см.

Пов'язка складена «гармошкою» та має пласку упаковку.

Матеріал

Неткане полотно, просочене кровоспинним розчином.

Застосування

Кровоспинну пов'язку можна помістити безпосередньо до рани
(проникаючий отвір) або накладати поверх неї.

CELOX Rapid підходить для різаних, рваних та множинних ран, порізів
і розсічень, випадків артеріальної або венозної кровотечі, а також
кровотечі під тиском.

Перевірте термін придатності та цілісність упаковки виробу.

Розкрийте пакет CELOX Rapid. Виконайте щільну тампонаду джерела
кровотечі пов'язкою CELOX Rapid. Щільно притискайте пов'язку до
рани протягом 1 хвилини. Якомога швидше доправте потерпілого до
найближчого пункту медичної допомоги.

Виробник

Medtrade Products Ltd

Electra House, Crewe Business Park, Crewe, UK, CW1 6GL

Країна виробництва

Великобританія